



Fentanyl, Opioïdes (naturels et synthétiques) Détection de drogues Formation

Lingettes F1
(SACHET EN UNE PARTIE)

F1 // APERÇU



QUE PEUVENT DÉTECTER LES LINGETTES F1

les opioïdes synthétiques ou naturels et leurs analogues

- fentanyl, xylazine, carfentanil, oxycodone, héroïne, benzyl fentanyl, solution de fentanyl, hydrocodone, mépéridine, tramadol, morphine, métonitazène

SOUS QUELLES FORMES LES LINGETTES F1 PEUVENT-ELLES ÊTRE TESTÉES ?

- poudres, pilules, liquides, résidus, traces et vrac

TECHNOLOGIE DE CHANGEMENT DE COULEUR

- Lorsque le F1 entre en contact avec du fentanyl, des opioïdes synthétiques ou naturels, tels que l'oxycodone, la morphine, l'héroïne ou d'autres, il devient rose/magenta pour indiquer la présence de fentanyl ou de ses analogues.
- La couleur du résultat positif correspondra à celle de l'emballage



Note : Le kit Trace-Eye-D est destiné à être utilisé à des **fins d'identification présumptive uniquement**, et toutes les substances testées doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi par des scientifiques dans un laboratoire criminel correctement équipé.

F1 // COMMENT UTILISER



Ouvrez. Essuyer. Regardez.

Réduisez la contamination croisée et l'exposition au F1, aux surfaces de test et aux échantillons en portant un équipement de protection individuelle (EPI) conforme aux normes industrielles, tel que des gants en nitrile, une protection oculaire et un masque N95 équivalent.

1

Ouvrez le sachet et retirez la lingette. Ne pas déplier la lingette avant ou après utilisation. Vous auriez du mal à observer les résultats.

2

Essuyez la sur la surface à tester. Pour obtenir les meilleurs résultats, prélevez de très petites quantités de la substance sur le bord de la lingette.

3

Regardez si la formule de la lingette change de couleur.

La plupart des résultats sont instantanés, mais certains peuvent prendre jusqu'à 30 secondes pour qu'une réaction colorée se développe.

- résultat négatif // PAS de changement de couleur
- résultat positif // rose / magenta

F1 // RÉSULTATS

Ouvrez. Essuyer. Regardez.

résultat négatif
PAS de changement
de couleur



résultat positif
rose / magenta



F1 // POST TEST



Ouvrez. Essuyer. Regardez.

Tous les produits TRACE EYE-D peuvent être éliminés en toute sécurité dans le flux des déchets ordinaires sans neutralisation ou autre traitement spécial, à condition que la lingette ne soit pas contaminée par des résidus de médicaments

1

PHOTOGRAPHE + CONSERVATION de la lingette avec un tampon date/heure, si nécessaire pour la conservation des preuves, car la couleur de la lingette peut changer avec le temps.

2

ÉLIMINER la lingette conformément aux lois fédérales, nationales et locales sur l'environnement. Aucune neutralisation n'est nécessaire. Peut être éliminé avec les déchets ordinaires.

3

LAVEZ-VOUS LES MAINS + CHANGEZ DE GANTS avant d'effectuer des tests supplémentaires après un résultat positif.

Vous souhaitez une formation complémentaire pour votre équipe ?



RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT UNE SESSION DE FORMATION EN DIRECT