

TRACE EYE-D®

# Formación en la identificación de drogas metanfetamina / MDMA / GHB.

Toallitas M39  
Bolsa Bicompartimentada

# M39 // RESUMEN



## ¿QUÉ DETECTAN LAS TOALLITAS M39?

- Metanfetaminas, MDMA/éxtasis, sales de baño y PCP

## ¿CUÁLES SON LAS FORMAS QUE PUEDEN PROBAR LAS TOALLITAS M39?

- polvos, tabletas, líquidos, desechos, rastros y a granel


## TECNOLOGÍA DE CAMBIO DE COLOR

- Cuando M39 reacciona con metanfetamina, MDMA, sales de baño u otros, se vuelve azul/azul violáceo, indicando la presencia de metanfetamina o sus análogos.
- El color del resultado positivo coincidirá con el color del cuadro.



*Nota: El kit Trace-Eye-D está diseñado para usarse únicamente con fines de identificación presunta, y todas las sustancias analizadas deben someterse a un examen más definitivo por parte de científicos en un laboratorio criminalístico debidamente equipado.*

# M39 // INSTRUCCIONES

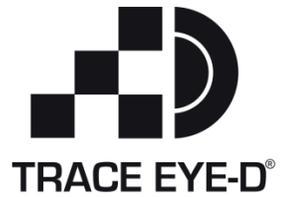

## *Abertura. Limpieza. Observación.*

***Reduzca la contaminación cruzada y la exposición al M39, las superficies de prueba y las muestras usando equipo de protección personal (EPP) estándar de la industria, como guantes de nitrilo, protección para los ojos y una mascarilla N95 equivalente.***

1

**ACTIVACIÓN + APERTURA** de la bolsa para retirar la toallita.

1. Doble la parte inferior de la bolsa por la mitad.
2. Presione la parte doblada hasta que se rompa el sello frágil. Debería escuchar un sonido de "pop" cuando se rompa el sello interno.
3. Trabaje minuciosamente el líquido de la pequeña cámara superior hacia la cámara inferior que contiene la toallita.

*No desdoble la toallita antes o después de su uso. Hacerlo resultará en dificultades para observar los resultados.*

2

**LIMPIE** la totalidad de la superficie a evaluar. Para lograr resultados óptimos, tome muestras de cantidades muy reducidas de la sustancia en el borde de la toallita.

3

**OBSERVA** si la fórmula en la toallita cambia de color.

Espera 30 segundos para permitir el desarrollo de una reacción de color.

- resultado adverso // sin cambio cromático
- resultado favorable // la prueba adquiere un tono azul/violáceo


# M39 // CONCLUSIONES

*Abertura. Limpieza. Observación.*

**Resultado desfavorable**  
*sin alteración cromática*



**Resultado favorable**  
*la reacción se vuelve azul/azul violáceo*

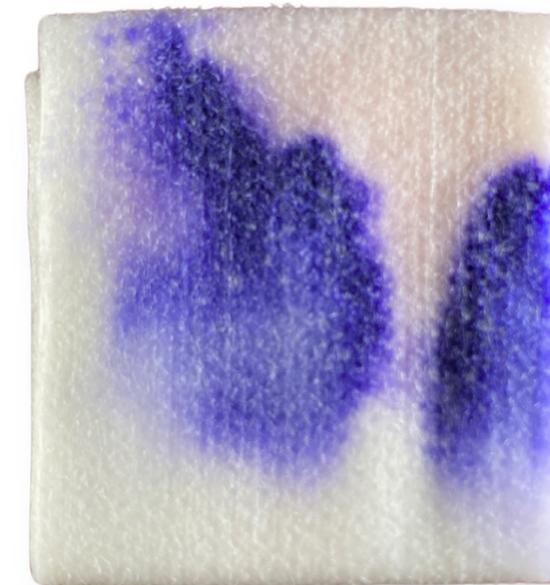

# M39 // POSTERIOR PRUEBA



## *Abertura. Limpieza. Observación.*

*Todos los productos TRACE EYE-D son seguros para su eliminación en el flujo de residuos común. sin neutralización u otro tratamiento especial, siempre que la toallita no esté contaminada con residuos de medicamentos*

- 1 FOTOGRAFÍA + REGISTRA** la toallita con un sello de fecha y hora, si es necesario para conservar la evidencia, ya que el color de la toallita puede cambiar con el tiempo.
- 2 DESECHE** la toallita según las leyes ambientales locales, estatales y federales. No es necesario neutralizarla. Puede desecharse en el flujo de residuos común.
- 3 LÁVATE LAS MANOS + CAMBIA** tus guantes antes de llevar a cabo pruebas adicionales tras obtener un resultado positivo.

¿Interesado en capacitación adicional para su equipo?



RESERVA AHORA UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO EN VIVO.